

Avantages

L'interface rotative Axion est tranquille, a un mouvement fluide et ne nécessite aucune lubrification. L'amplitude de la rotation peut être limitée ou arrêtée au moyen d'une simple poignée ronde. Cela permet de positionner le repose-tête sur un angle fixe ou d'être fluide.

Un certain freinage peut être introduit afin de ralentir la rotation, si on le désire.

Habituellement l'Axion est utilisé pour permettre une rotation latérale de la tête avec le repose-tête. Cela permet à la tête d'être entièrement soutenue par le repose-tête lorsqu'il tourne. L'avantage pour ceux qui ont une faiblesse musculaire est que cela assure le soutien du repose-tête alors qu'ils tournent latéralement.

Pour ceux qui ont un bon tonus musculaire mais qui ont tendance à se frotter fréquemment contre le repose-tête, l'Axion permet que le repose-tête bouge avec leur tête. Cela peut réduire ou éliminer le frottement entre la tête et le repose-tête réduisant ainsi la perte de cheveux et l'écorchure éventuelle de la tête.

Taille – Numéro de produits

- Axion-6019 permet une rotation de 60 degrés, s'adapte sur une boule de 19 mm
- Axion-6025 permet une rotation de 60 degrés, s'adapte sur une boule de 25 mm
- Axion-9019 permet une rotation de 90 degrés, s'adapte sur une boule de 19 mm
- Axion-9025 permet une rotation de 90 degrés, s'adapte sur une boule de 25 mm

Note:

L'Axion-6019 et l'Axion-9019 comprennent un anneau pour s'attacher à la monture Whitmyer de 19 mm.

L'Axion-6025 et l'Axion-9025 comprennent un anneau pour s'attacher au repose-tête qui ont une monture de 25 mm.

Application



L'Axion peut être utilisé avec un large éventail de repose-tête

Adaptateur Netti

Partie: NA-150 & NA-250

Cet adaptateur permet à l'Axion-6025 et l'Axion-9025 d'aller avec l'équipement Netti.



Monture de repose-tête

Partie: HRHCO

Cette monture permet à l'Axion-6025 et l'Axion-9025 d'aller sur le dos d'un fauteuil roulant

L'Axion-6019 et l'Axion-9019 peuvent aller sur un équipement Whitmyer.



D'autres excellents produits de Symmetric Designs

Minerve
Headmaster



La
Minerve OTT



L'appui-tête
Savant



Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513
BH The Hague, The Netherlands



L'Axion

Interface rotative pour repose-tête de fauteuil roulant

L'interface rotative pour repose-tête de fauteuil roulant Axion peut être fixée sur la plupart des repose-tête et montures. Elle permet aux repose-tête de tourner librement, améliorant ainsi les capacités de l'utilisateur.

L'Axion s'adresse à ceux qui ont un contrôle de tête limité et une étendue du champ d'action ou de vision limitée. Elle s'adresse aussi à ceux qui tournent fréquemment la tête contre le repose-tête.



 symmetric
designs

Instructions d'ajustage

Choisir la taille correcte

L'Axion est disponible en 4 versions afin de s'adapter à deux tailles de boules et deux amplitudes de rotation

- L'Axion 6019 et l'Axion 9019 vont sur une boule de 19 mm
- L'Axion 6025 et l'Axion 9025 vont sur une boule de 25 mm
- L'Axion 60R82 et l'Axion 90R82 vont sur R82 (19 mm est la taille du repose-tête et de l'équipement Whitmyer)



- Axion-60 permet une rotation totale de 60 degrés
- Axion-90 permet une rotation totale de 90 degrés

Rotation

Le rail de guidage incurvé tourne avec le repose-tête pour empêcher des blocages entre le rail et le repose-tête. Le rail de l'Axion-90 est plus long que le rail de l'Axion-60. Il se peut que ce rail plus long dépasse du bord des plus petits repose-tête. Dans le doute, choisir la série Axion-60.



L'Axion est composé de la base, d'un rail de guidage incurvé et d'une boule sur une tige.



Le rail de guidage tourne avec le repose-tête. La base reste fixe. La poignée ronde en-dessous permet de bloquer dans n'importe quelle position de rotation.



La rotation a un angle de 30° de chaque côté pour l'Axion-60 et de 45° de chaque côté pour l'Axion-90.



L'Axion se place entre le repose-tête du fauteuil roulant et la monture du repose-tête.



Attacher le repose-tête à la boule de l'Axion. Assurez-vous que c'est aligné symétriquement



Monter l'Axion sur la monture du repose-tête.



Fixer l'Axion monté à la monture sur le fauteuil roulant



Le repose-tête devrait suivre la tête librement lorsqu'elle tourne



L'Axion peut être utilisé sur une large variété de repose-tête